



Procedurevejledning

Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper (FE)

Torsten Slotsbjerg, okt. 2001



Laryngoskoper

Fleksible endoskoper uden kanaler, der anvendes over stemmelæberne

- Manuel rengøring
- Overfladedesinfektion med 70 vol% alkohol.
 - Alternativ: desinfektion i vaskedekontaminator
- Kan nu anvendes inden for 3 døgn
 - Overskrides 3 døgnreglen: Ny desinfektion

Torsten Slotsbjerg, okt. 2001



Gastrointestinale FE 1

Gælder ikke for duodenoskoper

- Manuel rengøring
- Dekontaminering i vaskedekontaminator
- Alkoholprocedure før lagring
- Kan anvendes inden for 3 døgn

Torsten Slotsbjerg, okt. 2001



Gastrointestinale FE 2

3-dagsreglen overskredet

- Vask og desinfektion i vaskedekontaminator
- Endoskopet kan nu anvendes

Torsten Slotsbjerg, okt. 2001



Risikoprocedurer

ERCP, PEG, bronkoskopier og cystoskopier

- Før endoskopi
 - Vask og desinfektion i vaskedekontaminator
 - Alkoholprocedure
- Efter endoskopi
 - Manuel rengøring
 - Proceduren fra før endoskopi

Torsten Slotsbjerg, okt. 2001



Invasiv endoskopi 1

Fleksibel endoskopi i sterile hulrum som led, bughule, hjerneventriler, blodkar etc.

- Før endoskopi
 - Dekontaminering i Steris System 1
 - Alkoholprocedure
 - Alternativ: Et plasmasteriliseret endoskop.
 - Mindre velegnet
 - Kemisk termodesinfektion med glutaraldehyd
 - Alkoholprocedure

Torsten Slotsbjerg, okt. 2001



Invasiv endoskopi 2

- Efter endoskopi
 - Manuel rengøring med egnet detergent
 - Dekontaminering i Steris System 1
 - Alkoholprocedure
 - Alternativ: Plasmasterilisation
 - Mindre velegnet:
 - Kemisk termodesinfektion med glutaraldehyd
 - Alkoholprocedure

Torsten Slotsbjerg, okt. 2001



Specialprocedure 1

Endoskoper med speciel risiko for opformering af mikroorganismer

- Endoskoper
 - Der har været efterladt i en dekontaminator natten over
 - Der har været til reparation
 - Der har været opbevaret i en kuffert
 - Der er nyindkøbte
 - Der ikke er behandlet som anført i denne vejledning

Torsten Slotsbjerg, okt. 2001



Specialprocedure 2

- Kanalerne fyldes med et enzymholdigt detergent og efterlades i 10 min.
- Manuel rengøringsprocedure
- Vask og desinfektion i vaskedekontaminator
 - Må ikke ske sammen med andre endoskoper
- Alkoholprocedure
- Endoskopet er klar til brug

Torsten Slotsbjerg, okt. 2001
