



# Kvalitetskontrol

## Af rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper



---

## Rengøring og desinfektion af prober til oesophagus ekkokardiografi.

### 1. Før anvendelse

- Prober, der er rengjorte og desinficeret som anført under punkterne 2 og 3, kan umiddelbart anvendes.
- Andre prober desinficeres som anført under punkt 3.

### 2. Manuel rengøring

- Proben nedsænkes i frisktappet vand tilsat et enzymholdigt detergent og overfladen afvaskes.
- Proben skylles i koldt ledningsvand og aftørres.

### 3. Kemisk desinfektion

- Proben nedsænkes i Cidex OPA<sup>®</sup> i 5 min.
- Proben skylles omhyggelig med frisktappet ledningsvand og aftørres herefter.
- Proben er nu klar til anvendelse inden for 3 døgn.

### Anbefalet detergenter:

- Cidexzyme
- Ultrasan
- (3E-Zyme)
- (Bodedex forte)